

emwave[®] pro
stress relief system

+ ♥ HeartMath

Notice d'utilisation pour PC et Mac

Table des matières

Bienvenue dans le monde de la technologie emWave®	5
emWave® Pro: nouvelles fonctions à partir de la v3	6
HeartCloud	6
Mandala	7
Journal	8
Menu Fichier	8
Menu Preferences -> General Tab	8
Menu Preferences -> Advanced Tab	8
Menu View et trois nouveaux aperçus	9
L'Inspector	9
Base de données	9
Utilisateurs - Users	9
Premiers pas	10
A propos de ce mode d'emploi	10
Contenu de la boîte	10
Installer le logiciel sur un MAC	10
Double-clic sur l'icône de fichiers emWave	10
Double-clic sur l'icône d'installation emWave	10
Cliquez sur "Continue" (= poursuivre)	10
Installer le logiciel sur un PC	11
L'installation ne démarre pas automatiquement	11
Double-clic sur le fichier „set up emWave“	11
Enregistrer la licence	12
Enregistrement sur Internet (facultatif)	12
Enregistrement par courrier postal (facultatif)	12
Installer le matériel	13
1. Connexion du module d'enregistrement sur port USB	13
2. Cliquer le capteur de pulsations à l'oreille	13
Démarrer une séance	14
Mesures	15
Valeurs de la cohérence	16
Valeurs de cohérence en % (Cohérence Ratios):	17
Arrêter et sauvegarder une séance	18
Valeurs de cohérence cumulées	18
Evaluation du résultat de cohérence cumulé	19

Power Spectrum (pour utilisateurs avancés)	20
Utilisation du Cohérence Coach®	20
Jouer à un jeu	21
L'Emotion Visualizer®	22
Aides supplémentaires	22
Outils d'aide	22
Aide en ligne	22
Utilisation, Droits, Brevet, Licences et Garantie	23
Conseils de sécurité	27

Bienvenue dans le monde de la technologie emWave®

La technologie brevetée emWave a été mise au point pour vous permettre de gérer le stress plus sainement, d'accroître votre résilience et d'améliorer vos performances dans tous les domaines de la vie.

La technologie emWave, développée par Doc Childre, est un système d'entraînement unique qui se base sur des années de recherche dans le domaine du stress, des émotions et de la performance.

L'emWave Pro mesure votre rythme cardiaque et vous montre votre cohérence physiologique. La cohérence est l'équilibre optimal entre le cœur, le cerveau et les émotions. Il a été prouvé que cet état est particulièrement bénéfique sur le plan mental, physique et émotionnel. Lorsque vous êtes en cohérence, votre système immunitaire, votre taux hormonal et votre système nerveux fonctionnent en parfaite harmonie physiologique. En pratiquant la technique de *Quick Cohérence* et d'autres techniques proposées par HeartMath vous apprenez à parvenir instantanément dans un état de cohérence et vous pourrez observer et expérimenter des changements immédiats dans le schéma de votre rythme cardiaque.

emWave® Pro: nouvelles fonctions à partir de la v3

HeartCloud

Lorsque vous êtes enregistré dans HeartCloud, vous pouvez télécharger ou synchroniser vos séances à partir des différents systèmes HeartMath. Vous disposez ainsi de toutes les informations sur le déroulement de vos séances en un coup d'œil et pouvez évaluer celles-ci à travers différents graphiques. Vous pourrez y retrouver aussi de nombreuses astuces utiles.



HeartCloud™ est une plateforme récente mise à la disposition des milliers d'utilisateurs de HeartMath. HeartCloud offre un accès centralisé à toutes les données des séances suivies sur emWave® Pro, emWave®2 et l'application Inner Balance™, permettant ainsi aux utilisateurs d'améliorer leur expérience avec le système de biofeedback et les techniques de cohérence HeartMath.

Les données des séances peuvent être facilement échangées dans le HeartCloud, ce qui favorise une coopération proactive en équipes, permet de modifier les habitudes et améliore les performances. Un système de récompenses (*Awards*) motive à pratiquer et garantit la persévérance dans la pratique des techniques HeartMath. En tant qu'utilisateur du HeartCloud, vous pouvez également utiliser les fonctions de rappel automatique pour modifier vos réactions émotionnelles au stress de manière encore plus ciblée.


Mandala

Vous pouvez démarrer le mandala avant chaque séance ou avant de revoir une séance écoulée (menu Exécuter → Repasser la séance HRV).



Calez votre rythme respiratoire sur le mouvement du mandala pour augmenter l'équilibre interne entre votre cœur et vos émotions.


Dans les paramètres (menu Editer → Préférences) vous pouvez déterminer si le mandala doit apparaître automatiquement au démarrage de la séance (cocher la case „Always Open Mandala“).

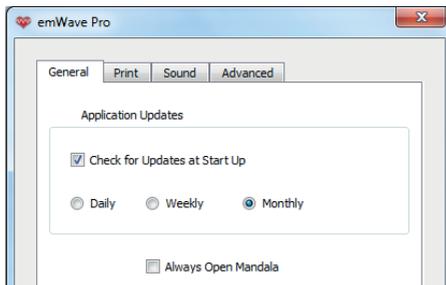

Remarques importantes :

- Le mandala ne fonctionne pas sur les anciens systèmes d'exploitation ni sur Windows XP.
- Vous ne pouvez pas faire fonctionner le mandala en même temps que le cadenceur de respiration (*breath pacer*).

Journal

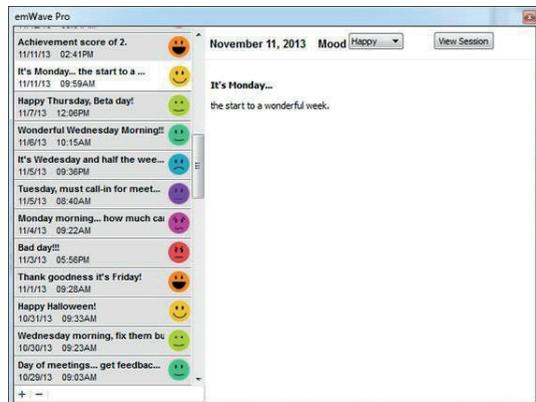

Vous pouvez commenter chaque session dans le journal d'entraînement (particularités, expériences vécues, etc.). Grâce au HeartCloud, il vous est possible de synchroniser les entrées enregistrées dans le journal sur tous vos appareils. Vous pouvez aussi ajouter, modifier ou effacer ces entrées dans l'aperçu du journal. Utilisez le signe « + » en bas à gauche pour ajouter une nouvelle entrée. Cliquez ensuite sur « entrée » pour ajouter du texte et sur le menu déroulant du milieu en haut de l'écran à côté de « Mood » pour choisir l'émoticône correspondant à votre humeur.

Menu Fichier

- Le menu *Import Session* n'est plus disponible.
- Le menu *Import emWave PC* n'est plus disponible.
- Export Session* utilise un nouveau format de données: *.json.
- L'export en données texte est toujours possible au format RR.

Remarque importante : L'export de sessions vers la version 2 d'emWave est également possible au format .xml et se trouve sous le menu *Edit -> Preferences -> Advanced -> Export to v2 Format*.

Menu Preferences -> General Tab

Si vous cochez l'option *Always Open Mandala*, le mandala (voir ci-dessus) démarre automatiquement lors du lancement d'une nouvelle session.

Menu Preferences -> Advanced Tab

- Heart Cloud Status*: Ce menu permet aux utilisateurs de HeartCloud de se (dé)connecter.
- Forgot Password*: Menu de réinitialisation du mot de passe du HeartCloud en cas d'oubli.
- Menu permettant d'exporter les nouvelles sessions (Version Pro v3) dans la version Desktop emWave v2. Cet export utilise le format standard xml et permet aussi de convertir les sessions du format 3.x db en format 2.x db.

Menu View et trois nouveaux aperçus

- Cloud*
- Journal*
- Mandala*

Ces trois aperçus peuvent également être sélectionnés en haut à droite de l'écran principal :



L'Inspector

Les titres et les commentaires des séances ont été remplacés par le Journal. Les textes des utilisateurs existants ont été pour la plupart transférés en tant qu'entrées du journal.

Base de données

Le format de la base de données (*database*) a subi d'importants changements : Les bases de données ancienne version 2.x sont automatiquement mises à jour à l'installation de la v3. Si vous avez des bases de données de grande taille, cela peut prendre quelques minutes pour que toutes les données soient converties. N'interrompez pas le processus de conversion. La nouvelle version de la base de données 3.x ne peut pas être ouverte dans les versions emWave 2.x ou 1.x.

Utilisateurs - Users

- Lorsque vous créez un nouvel utilisateur (*Add User*) ou modifiez les données d'un utilisateur existant (*Edit Current User*), il vous est possible de choisir dans la boîte de dialogue l'option de connexion et de synchronisation avec le HeartCloud. Il vous faudra ensuite entrer l'adresse e-mail de l'utilisateur et définir un mot de passe.
- Lorsque vous avez installé emWave2 et emWave Pro sur votre ordinateur, emWave2 affichera le nom du dernier utilisateur d'emWave Pro. Ainsi, emWave2 peut gérer plus d'un utilisateur mais uniquement en connexion avec emWave Pro.

Premiers pas

A propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi est un manuel condensé sur l'application emWave Pro. Il n'est pas possible d'y présenter tous les thèmes et toutes les fonctions d'emWave Pro. Vous pouvez toutefois trouver de plus amples informations dans le menu d'Aide ou dans le Quick Start guide fourni avec le logiciel. Vous pouvez également visiter le centre de support Online à l'adresse : <http://support.emwave.com>.

Contenu de la boîte

CD avec l'application emWave® Pro
Module d'enregistrement des pulsations
Capteur de pulsation (connecté au module d'enregistrement des pulsations)
Mode d'emploi

Installer le logiciel sur un MAC

Pour pouvoir installer le programme, il vous faut un numéro d'enregistrement qui se trouve sur le dos du mode d'emploi en anglais (*Owner's Manual*) joint au CD dans une pochette en plastique. Placez le CD dans le lecteur CD-ROM et lancez l'installation de l'application.

Double-clic sur l'icône de fichiers emWave

Le fichier d'installation emWave Pro se trouve dans le premier écran qui apparaît.

Double-clic sur l'icône d'installation emWave

"Welcome to the emWave Pro Installator" s'affiche et vous guide tout au long de l'installation.

Cliquez sur "Continue" (= poursuivre)

Veillez lire l'accord de licence (*License Agreement*). Lorsque vous cliquez sur *Continue*, une fenêtre s'ouvre pour vous demander si vous souhaitez lire l'accord de licence et l'accepter. En cliquant sur *Agree* (= j'accepte), l'installation se poursuit.

Par défaut, le programme est installé sous "Macintosh HD". Cliquez sur *Install*, pour poursuivre. L'*Installator* vous demande d'entrer votre mot de passe. Cliquez sur OK pour continuer.

Suivez les instructions données à l'écran. L'emWave Pro configure votre installation et copie les documents nécessaires sur votre ordinateur. Nous conseillons de lire les différents menus d'aide et surtout le Quick Start Guide installés sur votre ordinateur une fois l'installation terminée. Le Quick Start Guide vous donne les instructions pour installer le matériel et démarrer une séance.

Remarque : à la fin de l'installation, vous serez normalement invité à télécharger les mises à jour. Nous vous conseillons vivement d'accepter afin que vous bénéficiez de la dernière version disponible sur votre ordinateur.

Installer le logiciel sur un PC

Pour pouvoir installer le programme, il vous faut un numéro d'enregistrement qui se trouve sur le dos du mode d'emploi en anglais (*Owner's Manual*) joint au CD dans une pochette en plastique. Placez le CD dans le lecteur CD-ROM et lancez l'installation de l'application.

L'installation ne démarre pas automatiquement

Cliquez sur „Démarrer“ pour accéder au „Bureau“ sur votre ordinateur et double-cliquez sur l'icône du lecteur de DVD/CD.

Double-clic sur le fichier „set up emWave“

Le programme d'installation d'emWave Pro s'ouvre. Cliquez sur *Continue* (= poursuivre), pour démarrer l'installation.

Lisez l'accord de licence (*License Agreement*). Si vous y adhérez, cliquez sur *Agree* (= j'accepte) et poursuivez l'installation.

L'„*Installer*“ est un utilitaire convivial qui installe le logiciel en quelques minutes. Nous conseillons de lire les différents menus d'aide et surtout le Quick Start Guide installés sur votre ordinateur une fois l'installation terminée. Le Quick Start Guide vous donne les instructions pour installer le matériel et démarrer une séance.

Remarque : à la fin de l'installation, vous serez normalement invité à télécharger les mises à jour. Nous vous conseillons vivement d'accepter afin que vous bénéficiez de la dernière version disponible sur votre ordinateur.

Lorsque le logiciel est correctement installé, une icône *emWave desktop PC* s'affiche sur votre bureau. Il vous suffit de cliquer sur l'icône pour démarrer l'application.

Enregistrer la licence

Lorsque vous démarrez emWave Pro pour la première fois, il vous est demandé d'enregistrer la licence. Votre enregistrement nous permet de vous envoyer les mises à jour et autres nouvelles importantes.

Une fois le numéro de licence entré (vous le trouverez au dos du mode d'emploi anglais), vous êtes invité à encoder vos informations utilisateur (= données personnelles). Entrez votre nom, votre âge et votre adresse email. emWave Pro démarre et plusieurs fenêtres s'ouvrent en même temps. La première concerne la mise à jour d'emWave et vous demande si vous souhaitez chercher la version la plus récente du logiciel. La deuxième fenêtre est celle de l'Aide emWave Pro qui vous permet de chercher des informations classées par thème. La troisième et dernière fenêtre reprend vos données personnelles. Toutes ces fenêtres peuvent être fermées si vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat.

Il se peut également qu'une fenêtre s'ouvre pour l'enregistrement en ligne de la licence. Il n'est pas obligatoire de remplir cette page pour la garantie. Ces données vont servir à vous enregistrer dans la liste de distribution de la Newsletter américaine. Vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant sur la croix rouge en haut de la page.

Enregistrement sur Internet (facultatif)

- Veillez à ce que votre ordinateur soit connecté à Internet après installation d'emWave Pro.
- Ouvrez le menu *Help* et cliquez sur *Register emWave Desktop*. La page *Online Product Registration* apparaît.
- Remplissez le formulaire et cliquez dans le bas de la page sur *Create Account* pour entrer vos données personnelles et terminer l'enregistrement.

Enregistrement par courrier postal (facultatif)

- Remplissez la carte fournie avec le logiciel.
- Collez un des autocollants reprenant le numéro de licence sur la carte ou écrivez ce numéro.
- Envoyez la carte par la poste.

Installer le matériel

Votre ordinateur doit être allumé, le logiciel emWave Desktop doit être installé et vous devez disposer du matériel suivant : le module d'enregistrement USB et le capteur de pulsations à clipser à l'oreille.

1. Connexion du module d'enregistrement sur port USB

Connectez le capteur de pulsations au module d'enregistrement USB que vous insérez dans un port USB libre de votre ordinateur. Une fois pluggé, le voyant lumineux du module doit s'allumer brièvement pour confirmer la connexion. Ensuite le LED du module s'éteint et restera éteint jusqu'à ce que vous démarriez une session.



Le câble du capteur de pulsations doit être bien inséré dans le module d'enregistrement USB, c'est-à-dire que la fiche du capteur doit être complètement entrée dans le module. Si le voyant ne s'allume pas, cela signifie que le module n'est pas reconnu. Consultez le menu d'aide dans ce cas.

2. Clipser le capteur de pulsations à l'oreille

Clipsez le capteur au lobe de votre oreille de sorte que cela reste agréable et fixez l'attache à votre vêtement, par exemple au col de chemise. Positionnez l'attache le long du câble pour que celui-ci ne soit pas trop tendu. Il faut que vous puissiez bouger le capteur légèrement sur votre lobe pour permettre une mesure encore plus précise de vos pulsations.

Le capteur doit être directement clipsé au lobe de l'oreille. Les mesures sont plus précises lorsque le lobe est chaud. Si nécessaire, vous pouvez brièvement réchauffer le lobe en le pressant entre le pouce et l'index avant de fixer le capteur.

Remarque : il existe également un capteur qui se fixe au bout du doigt plutôt que sur le lobe de l'oreille. Vous le trouverez dans notre webshop.




Démarrer une séance

Au début, prenez plusieurs inspirations profondes avant de clipser le capteur. Ces inspirations doivent vous permettre de vous détendre et d'obtenir un bon enregistrement. Une fois le capteur correctement fixé, cliquez sur **Start**.




Ensuite, le capteur est calibré et l'écran suivant apparaît :

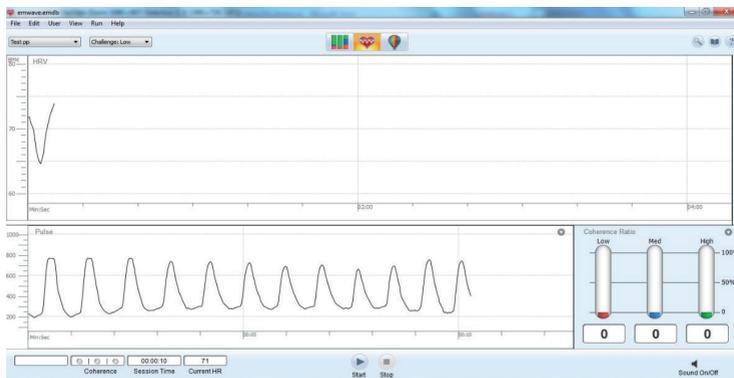


En bas à gauche, vous pouvez voir vos pulsations (*Pulse*). Notez que la parole ou le mouvement diminuent la précision du capteur.

Lorsque le capteur a été calibré sur vos pulsations, la partie inférieure de l'écran change et affiche sur la gauche le score de cohérence cumulé et sur la droite votre résultat de cohérence en %.

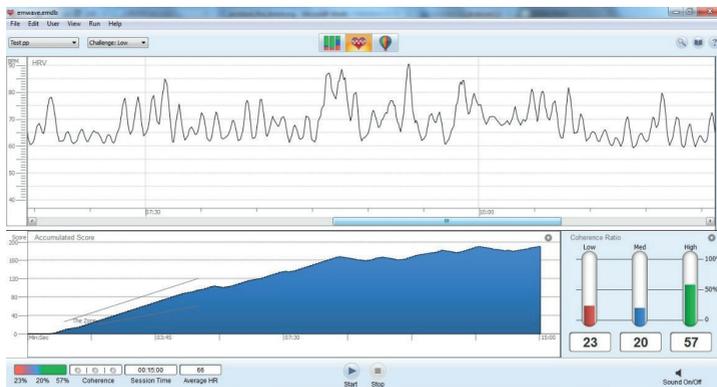


Vous obtiendrez de meilleurs résultats lorsque vous êtes calme et ne bougez pas. Si vous voyez des lignes rouges (ou artefact) apparaître dans vos pulsations, modifiez la position du capteur pour obtenir des vagues lisses et régulières. Lorsque vous bougez le capteur, il se peut que vous deviez attendre quelques secondes avant que les pulsations soient de nouveau visibles à l'écran. Il vous est également possible de faire apparaître l'écran montrant vos pulsations en cliquant sur la petite flèche dans le graphique en bas à gauche et en sélectionnant *Pulse*.

Mesures

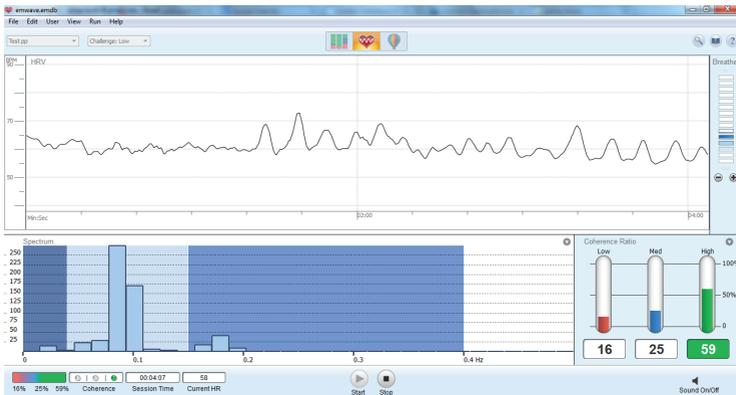


Le schéma de votre rythme cardiaque (HRV = la variabilité de la fréquence cardiaque) au cours d'une séance vous donne des informations très complètes sur votre condition physiologique. Car il vous permet d'obtenir un aperçu des changements permanents opérant dans votre système nerveux autonome. Vous pouvez même retirer davantage d'informations si vous analysez les points obtenus en cohérence cumulée (*Accumulated Coherence*).

Exemple 1 : schéma HRV régulier et cohérent, proche de l'idéal.

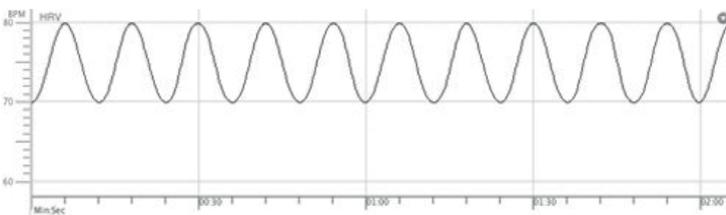

Dans la plupart des cas, même une personne en bonne condition physiologique n'obtiendrait pas un schéma aussi idéal. Au début, le schéma ressemblera plutôt à ceci.

Exemple 2 : Schéma d'un rythme cardiaque incohérent

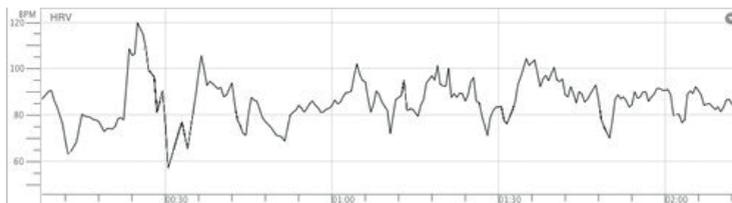

Lorsque vous pratiquez la technique de cohérence rapide régulièrement, la forme de la courbe se modifie. Au départ fort hachurée et incohérente, la courbe suit peu à peu une ligne plus lisse et cohérente.


Valeurs de la cohérence

Au cours d'une séance, vous voyez apparaître à l'écran les valeurs continuellement mises à jour de votre cohérence physiologique en %, de votre niveau de cohérence présent ainsi que de votre pouls (*HR*).

Ces informations sont enregistrées sur base de votre variabilité de fréquence cardiaque (*HRV*) et actualisées toutes les cinq secondes. Au niveau du graphique représentant votre cohérence cardiaque en % (*Coherence Ratios*) en bas à droite, les barres horizontales de couleur vous indiquent si vous vous trouvez actuellement dans un état de cohérence faible (rouge), moyenne (bleu) ou élevée (vert) (= niveau de cohérence en temps réel). En fonction du changement d'état, les barres passent du rouge au bleu et puis au vert.

Les 3 barres verticales indiquent quant à elles votre cohérence pour toute la durée de votre séance. La somme de ces états équivaut toujours à 100%. Les barres du graphique des valeurs de cohérence en pourcent montrent combien de temps vous avez passé au cours de la séance dans un niveau de cohérence faible, moyen ou élevé. L'objectif étant d'augmenter votre niveau de cohérence. Par une pratique régulière avec l'emWave Pro, vous parviendrez à rester de plus en plus longtemps dans un état de cohérence élevée.


Valeurs de cohérence en % (Coherence Ratios):

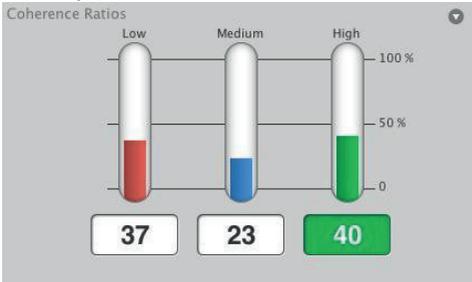


Selon ce schéma, l'utilisateur était :

- 37% du temps dans un niveau de cohérence faible (*Low*)
- 23% du temps dans un niveau de cohérence moyenne (*Medium*)
- 40% du temps dans un niveau de cohérence élevé (*High*)

Tout au long de la séance, la case de couleur située en dessous de la barre d'état indique le niveau de cohérence actuel (ici en vert). Idéalement, vous devriez vous trouver 100% du temps dans un niveau de cohérence élevé.

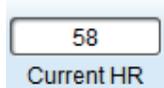

La fréquence cardiaque enregistrée (*Current HR*) représente la fréquence cardiaque moyenne des 5 dernières secondes écoulées de la séance en cours.

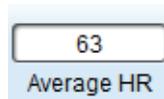

A la fin de la séance, le relevé de fréquence cardiaque indique la valeur moyenne de toute la séance (*Average HR*).



Le graphique sur la gauche reprend les valeurs des barres verticales du dessus. Les petites ampoules sur la droite (*Coherence*) vous donnent votre niveau de cohérence en temps réel.

Remarque importante : entre l'enregistrement, l'analyse et le rendu du résultat, il peut se passer un peu de temps.


Et n'oubliez pas qu'il vous est possible d'améliorer vos valeurs de cohérence en pratiquant la technique *Quick Coherence®*.

Arrêter et sauvegarder une séance

Pour arrêter la séance, cliquez simplement sur *Stop*.



La console emWave enregistre automatiquement les données de chaque séance et offre la possibilité d'en contrôler les progrès.

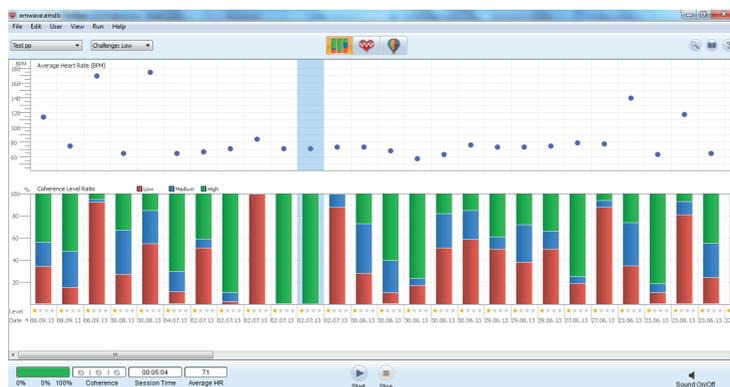


Vous obtenez cet aperçu lorsque vous cliquez sur le symbole affichant les trois barres d'état en haut au milieu de l'écran. Il vous est possible de revoir une séance enregistrée en double-cliquant sur la barre correspondant à une séance précise.

Chaque utilisateur peut sauvegarder les données dans une base de données personnelle. On peut y sauvegarder autant de séances que désiré.

Valeurs de cohérence cumulées

Le résultat de cohérence cumulé (*Cumulated Coherence Score*) est un aperçu linéaire de votre niveau de cohérence au cours d'une séance. Vous pouvez dès lors mesurer vos progrès pendant la séance et les comparer à ceux d'une autre séance enregistrée.

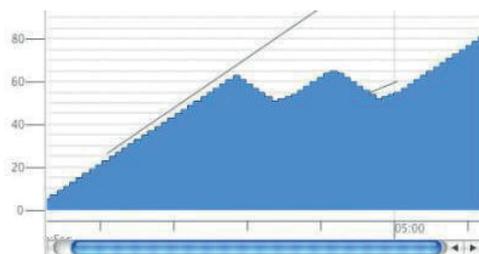

Evaluation du résultat de cohérence cumulé

Le résultat de cohérence cumulé – illustré ci-dessus en bleu – dépend de la durée que vous avez passée dans un niveau de cohérence faible, moyen ou élevé.

Lorsque vous vous trouvez dans un état de cohérence faible, la ligne perd du terrain, autrement dit va vers le bas. Tandis que lorsque vous vous trouvez dans un niveau de cohérence élevé, la ligne remonte.

Les chiffres à gauche de l'écran correspondent à des points. Pour chaque intervalle de 5 secondes que vous passez dans un état de cohérence moyen (bleu), vous obtenez un point (+1). Dans un état de cohérence élevé (vert), chaque intervalle équivaut à deux points (+2). A l'inverse, un état de cohérence faible (rouge) vous fait perdre deux points (-2).


Lorsque la ligne monte, votre total de points augmente. Lorsqu'elle chute, vos points diminuent.

Dès que votre score atteint plus de 5 points, vous voyez apparaître dans le graphique deux lignes obliques qui vont de gauche à droite en remontant. Ces lignes représentent une zone cible qui s'appelle *The Zone*. L'objectif est d'accumuler des points en restant dans un niveau de cohérence moyen ou élevé. De cette manière, la ligne bleue évolue entre les lignes obliques dans la zone optimale *The Zone*.

Sur l'écran affichant le résultat de cohérence cumulé vous pouvez voir à quelle distance vous vous trouvez de cette zone. Cela peut vous permettre d'atteindre un niveau de cohérence plus élevé.

Power Spectrum (pour utilisateurs avancés)


Vos progrès sont également repris sous forme de graphique dans ce qu'on appelle le *Power Spectrum* (PS). Pour faire apparaître le PS, il faut cliquer sur la petite flèche en haut à gauche ou à droite du graphique. Dans le PS de la version emWave Pro, la courbe HRV est distribuée en différentes composantes de fréquence.

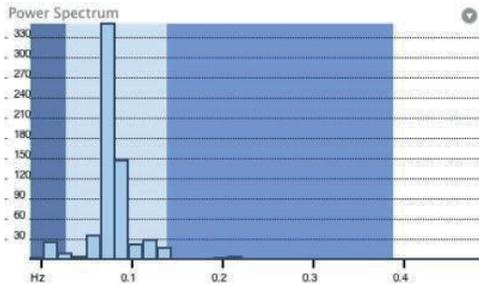

Des chercheurs ont ainsi pu démontrer que les barres bleues apparaissant dans les trois zones colorées représentent différentes activités du système nerveux autonome. Le PS nous aide à les identifier.

Le PS se découpe en trois zones : Le champ bleu foncé à gauche reprend les *VLF* (très basses fréquences), la zone bleue claire est celle des *LF* (basses fréquences) et la troisième zone à droite reprend les *HF* (hautes fréquences). Lorsqu'on parle de cohérence, l'activité principale se situe aux alentours de 0,1 Hz, c'est-à-dire au centre de la zone intermédiaire. C'est ce qui indique la synchronisation de la partie sympathique avec la partie parasympathique du système nerveux autonome.


A la fin d'une séance, vous pouvez observer le PS moyen de l'ensemble de la séance, le *Spectrum Average*.

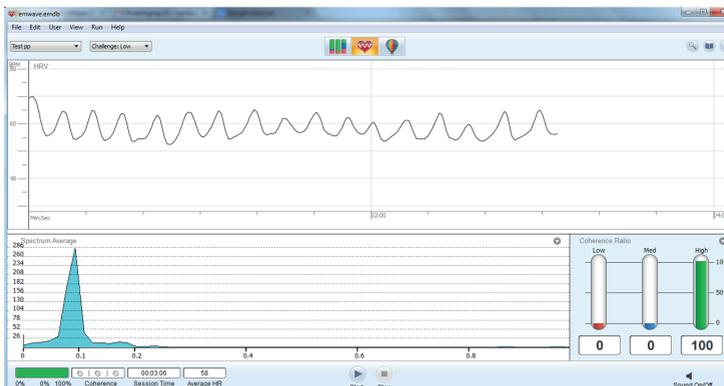

Pour obtenir plus d'informations sur le *Power Spectrum*, vous pouvez cliquer sur le menu d'aide en ligne.

Utilisation du *Coherence Coach*®

Pour ouvrir le *Coherence Coach*, cliquez sur le ballon en haut de l'écran et parmi les choix qui s'affichent, cliquez sur celui du *Coherence Coach* en haut à gauche.

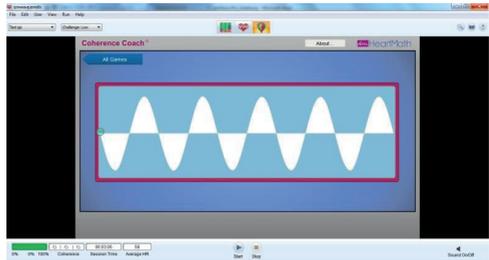

Attention :

Lorsqu'une session est en cours, il ne vous est pas possible d'ouvrir le *Coherence Coach* ni un des jeux proposés.

Fixez le capteur au lobe de l'oreille et cliquez sur *Play/Stop*. Synchronisez votre respiration sur le mouvement de la balle. Lorsque vous avez acquis le bon rythme, vous pouvez passer à une séance de *Quick Coherence*, en conservant le rythme respiratoire obtenu. Votre courbe *HRV* apparaît alors sur l'écran principal en arrière-plan et peut être consultée à tout moment. Dans la barre à gauche du symbole *Play/Stop*, vous pouvez voir votre niveau de cohérence en temps réel.

Lorsque le senseur est calibré, vous pouvez déplacer le bouton bleu dans la barre en bas à droite pour diminuer le volume. La barre en bas à gauche vous permet de la même manière de diminuer la vitesse de la balle verte. Suivez les instructions du *Coach* (en anglais).

Pour mettre fin à la séance, cliquez sur *Stop*, soit dans l'écran principal soit dans la fenêtre du *Coherence Coach*.

Vous pouvez encore consulter la progression de votre *HRV* dans l'écran principal. Celle-ci s'enregistre tout au long de votre séance et offre toutes les fonctionnalités d'une séance standard. En cliquant sur le symbole du cœur en haut de l'écran, vous pouvez passer à tout moment sur l'écran principal.

Jouer à un jeu

Cliquez sur le dessin du ballon en haut de l'écran de l'emWave Pro. Une page s'ouvre vous proposant différents jeux :



Jeu du ballon

Jeu du jardin

Jeu de l'arc-en-ciel

Après avoir cliqué sur le jeu souhaité, une nouvelle fenêtre s'ouvre.



Démarrez le jeu en cliquant sur le bouton *Start* en bas de la fenêtre. Après avoir calibré le capteur (cela ne prend que quelques secondes), le jeu démarre dès qu'un des trois voyants du niveau de cohérence s'allume.

Pour arrêter le jeu, cliquez sur le bouton *Stop* en bas au milieu de l'écran.

Pendant que vous jouez, la progression de votre courbe *HRV* s'enregistre dans l'écran principal en arrière-plan. A la fin du jeu, vous pouvez afficher votre séance sur l'écran principal ou consulter celle-ci plus tard en cliquant sur „*View Progress*“ (dessin du milieu en haut de l'écran).

Attention : Vous ne pouvez pas ouvrir de jeu en même temps qu'une séance.

L'Emotion Visualizer®

La fonctionnalité *Emotion Visualizer* consiste en l'affichage d'images qui évoluent en fonction de votre niveau de cohérence. Lorsque vous vous concentrez sur un sentiment positif comme la gratitude, la reconnaissance ou l'amour, l'image s'adapte à votre niveau de cohérence émotionnel. Ces images dynamiques vous donnent un feedback, ce qui vous permet d'augmenter encore votre niveau de conscience quant à la manière dont le souvenir de sentiments positifs peut agir sur votre cohérence.

Pour ouvrir l'*Emotion Visualizer*, cliquez sur *View > Games/Visualizers* ou sur le dessin du ballon et choisissez l'option *Emotion Visualizer*.

Cliquez sur le bouton *Start* de l'*Emotion Visualizer* pour démarrer une séance. Pratiquez en même temps la technique de *Quick Cohérence* pour renforcer davantage votre expérience visuelle.

Pour arrêter votre séance, cliquez soit dans l'écran principal de l'emWave Pro soit dans la fenêtre de l'*Emotion Visualizer*. Si nécessaire, il vous est possible de consulter la progression de vos données *HRV* enregistrées.

Aides supplémentaires

Outils d'aide

Le programme emWave Pro dispose de nombreux outils d'aide couvrant toutes sortes de thèmes dans le détail – ces outils sont disponibles en anglais uniquement. Pour y accéder, vous devez cliquer sur *Help* → *emWave Help* ou sur le point d'interrogation en haut à droite. Il vous est également possible de chercher un thème en particulier dans la table des matières par mots-clés ou via la fonction de recherche.

Aide en ligne

L'aide en ligne offre des informations et des réponses détaillées à toutes vos questions. Pour accéder à l'aide en ligne, vous devez cliquer sur *Help* → *Online Support*. Vous pouvez également cliquer sur le symbole du livre en haut à droite. La base de connaissances ou la fonction de recherche vous permettent de trouver réponse à vos questions.

Remarque : Remplissez le formulaire ci-dessous si vous souhaitez poser une question à notre *Online Support Center*.

Utilisation, Droits, Brevet, Licences et Garantie

Le système emWave Pro, y compris le matériel, le logiciel et la documentation, est livré avec un numéro de licence et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux conditions reprises sous la licence. Le contenu de cette documentation est fourni à titre d'informations uniquement, peut être changé sans préavis et ne doit en aucun cas être interprété comme un engagement de Quantum Intech, Inc. (QI).

Aucun élément de cette publication ne peut, sauf par l'octroi d'une licence, être copié ou dupliqué, conservé dans un système de stockage ou transmis à des tiers, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, par voie électronique, mécanique, par enregistrement ou autre sans l'accord préalable écrit de QI.

Nous vous rappelons que les illustrations et autres images existantes sont protégées par droit d'auteur.

Toute utilisation abusive des illustrations ou images enfreint les droits d'auteur. Veuillez à demander l'autorisation à l'auteur (aux auteurs) concerné(s).

emWave, Personal Stress Reliever, Coherence Coach et Emotion Visualizer sont des marques enregistrées appartenant à QI. HeartMath est un nom commercial enregistré par l'Institute of HeartMath. Quick Coherence est une marque enregistrée par Doc Childre. Pentium est un nom commercial enregistré par Intel, Inc. Tous les autres produits ou noms commerciaux sont la propriété de leur auteur. Écrit et développé par Quantum Intech, Inc., 14700 West Park Avenue, Boulder Creek, CA 95006, Etats-Unis, Téléphone: +1-831-338-8700; <http://www.quantumintech.com>; info@quantum-intech.com.

Für Rechtsanwaltskanzleien: limitierte Rechte. Verwendung, Duplikation oder Distribution sind Einschränkungen wie umschrieben im Subparagraph (c)(1)(ii) der Klausel Recht auf technischen Daten und Computer-Software von 252.227-7013 unterworfen. Für Zivilrechtskanzleien: Limitierte Rechte. Verwendung, Duplikation oder Distribution sind Einschränkungen wie umschrieben im Subparagraph (a) bis zu (d) der kommerziellen Klausel unterworfen.

Limitierte Rechte Computer Software von 52.227-19 und die Einschränkung wie im kommerziellen Standardvertrag der Quantum Intech beschrieben für diese Software. Unter Vorbehalt der nicht publizierten Rechte gemäß den Urheberrechten der amerikanischen Rechtsgebung.

EmWave Pro SOFTWARE LIZENZVEREINBARUNG

SIE DÜRFEN DIE SOFTWARE NICHT INSTALLIEREN ODER VERWENDEN OHNE ZUSTIMMUNG DES BESITZERS DER SOFTWARE, DER NUR DANN SEINE ZUSTIMMUNG GIBT, WENN SIE DIE ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG AKZEPTIERT HABEN. WENN SIE DIE SOFTWARE INSTALLIEREN ODER AUF EINE ANDERE WEISE VERWENDEN, STIMMEN SIE AUTOMATISCH DEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG ZU.

Dies ist eine rechtliche Vereinbarung (die Vereinbarung) zwischen Ihnen (einer Privatperson oder Organisation), dem Endverbraucher und Quantum Intech, Inc. (QI). Durch die Verwendung der mitgelieferten Software inklusive der zugehörigen Hardware (zusammen die SOFTWARE genannt) stimmen Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung zu. Falls Sie nicht mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden sind, senden Sie dieses Paket mit der SOFTWARE, inklusive der zugehörigen Hardware und anderen mitgelieferten Materialien, unverzüglich zurück an die Adresse, wo Sie es gekauft haben, um Ihren Ankaufbetrag zurückzuerhalten.

1. LIZENZBESTIMMUNGEN. Durch diese Vereinbarung verleiht QI Ihnen die folgenden Rechte bezüglich der Verwendung der SOFTWARE:

(a) *Lizenz.* Wenn Sie eine Privatperson sind, verleiht QI Ihnen eine Lizenz für das Installieren der SOFTWARE

und für deren persönlichen Gebrauch auf jedem Computer, der sich in Ihrem Besitz befindet oder welchen Sie mieten oder leasen. Falls Sie den Computer mieten oder leasen, stimmen Sie zu, dass Sie die SOFTWARE nach Ablauf Ihres Miet- oder Leasingvertrags löschen. Falls Sie eine Organisation oder Betrieb sind, verleiht QI Ihnen eine Lizenz für das Installieren der SOFTWARE auf einem Computer innerhalb Ihrer Organisation oder Betrieb für den Gebrauch als ein selbst gesteuertes Trainingsprogramm.

Autorisierte Händler dürfen die SOFTWARE verwenden, um das Produkt an mehrere Personen zu demonstrieren und um Personen Anweisungen über die Verwendung der SOFTWARE zu geben, dürfen aber für diese Vorführungen beim Kunden keine Kosten in Rechnung stellen. Mitarbeiter im Gesundheitswesen dürfen die SOFTWARE als Instrument bei ihrer täglichen Arbeit im Gesundheitswesen verwenden. Krankenhäuser, Kliniken, Betriebe, Schulen und andere Organisationen dürfen die SOFTWARE auf einem öffentlichen Computer für Demonstrationszwecke zur Verfügung stellen, solange für diesen Gebrauch keine Kosten in Rechnung gestellt werden.

QI gibt keine Zustimmung für den Gebrauch der registrierten Handelsmarken Quick Cohérence®, Freeze-Framer® Emotional Management Enhancer, emWave® oder jeglicher anderer Handelsmarke der QI, des Institute of HeartMath oder der HeartMath LLC in Werbeäußerungen oder für Marketingzwecke.

(b) *Übertragung.* Sie dürfen die SOFTWARE-Lizenz dieser Vereinbarung so oft Sie wollen auf einen anderen Computer übertragen. Privatpersonen dürfen die SOFTWARE gleichzeitig auf mehreren Computern installiert haben, unter dem Vorbehalt, dass alle betreffenden Computer in Ihrem Besitz sind oder durch Sie gemietet oder geleast werden. Falls Sie eine Organisation oder Betrieb haben, dürfen Sie die SOFTWARE auf einem einzigen Computer für einen einzigen Benutzer installiert haben, es sei denn, dass Sie eine Netzwerk-Lizenzvereinbarung unterzeichnet haben, welche die Gültigkeit dieser Vereinbarung ersetzt. Sie dürfen die SOFTWARE und die zugehörigen Materialien nicht ohne eine vorhergehende schriftliche Zustimmung durch QI mit anderen Produkten vertreiben. Sie dürfen die SOFTWARE nicht vermieten oder zum Leasing anbieten, aber Sie dürfen die Rechte dieser Vereinbarung dauerhaft übertragen, unter dem Vorbehalt, dass Sie dabei diese SOFTWARE-Lizenzkarte, alle Kopien der SOFTWARE und alle dazugehörigen Materialien übertragen und unter Vorbehalt, dass die Partei, an welche Sie übertragen, den Bestimmungen dieser Vereinbarung zustimmt. Jede Übertragung der SOFTWARE muss die aktuellste Version und alle vorgehenden Versionen der SOFTWARE beinhalten sowie die zugehörigen Materialien.

(c) *Kopieren.* QI verleiht Ihnen das Recht, identische Kopien des SOFTWAREPRODUKTES auf Ihrem(n) Computer(n) zu installieren und zu gebrauchen. Sie dürfen auch Kopien des SOFTWAREPRODUKTES machen, falls dies für Back-ups und Archivierungszwecke nötig ist.

(d) *Anmerkung für Benutzer.* Sie müssen alle Benutzer der SOFTWARE über die Bestimmungen dieser Vereinbarung informieren.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird unter Verwendung/Benutzung/Gebrauch verstanden: das Laden der SOFTWARE auf jegliche Art von Computerspeicher, inklusive RAM, und die Installation auf einer Harddisk oder anderem Speicherapparat. Zugang zur SOFTWARE dürfen Sie von einer Harddisk aus, über ein Netzwerk oder über jede andere durch Sie gewünschte Methode erhalten, solange Sie dabei die Bestimmungen dieser Vereinbarung einhalten.

2. COPYRIGHT. Die SOFTWARE ist Eigentum der QI und ist durch das Urheberrecht der Vereinigten Staaten und durch internationale Verträge geschützt. Sie müssen deshalb mit der SOFTWARE wie mit jedem anderen urheberrechtlich geschützten Material (wie Büchern oder Musikaufnahmen) umgehen, mit Ausnahme, dass Sie die SOFTWARE gemäß dieser Vereinbarung übertragen und kopieren dürfen.

3. PATENT. Es wird kein einziges Recht oder Lizenz verliehen, weder explizit noch implizit, unter welchem Patent auch, das ganz oder teilweise Eigentum ist von, unter Lizenz bei oder verwaltet durch QI, mit Ausnahme einer Lizenz, die unter einem solchen Patent für die Verwendung der SOFTWARE gemäß dieser Vereinbarung verliehen ist.

4. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. Diese SOFTWARE-Lizenz gilt als Beweis Ihrer Rechte für die Verwendung

der SOFTWARE. Sie dürfen die SOFTWARE nicht durch „Reverse Engineering“ oder sonst irgendwie verändern, umbauen, aufsplitten oder demontieren, außer wenn durch ein anwendbares Recht erlaubt. Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht des Staates Kalifornien, USA, ohne Rücksicht auf daraus resultierende Gesetzes- oder Regelkonflikte.

EmWave Pro SOFTWARE - BESCHRÄNKTE GARANTIE.

QI garantiert, dass die SOFTWARE eine Leistung erfüllt gemäß der zugehörigen gedruckten Dokumentation während einer Periode von einem Jahr ab Datum des Kaufs (die beschränkte Garantie). Jede implizite Garantie auf die SOFTWARE ist auf ein Jahr beschränkt.

IN MANCHEN STAATEN, PROVINZEN ODER LÄNDERN IST GESETZLICH KEINE BESCHRÄNKUNG DER DAUER DER BETREFFENDEN GARANTIE ERLAUBT, WESHALB OBENSTEHENDE BESCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE FÜR SIE NICHT ANWENDBAR IST. IN GROSSBRITANNIEN: NICHTS DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE HAT EINFLUSS AUF IHRE GESETZLICHEN RECHTE, INKLUSIVE IHRER EVENTUELLEN RECHTE GEGENÜBER QI.

LÖSUNGEN FÜR DEN KUNDEN. Die volle Haftung von QI und die für Sie spezifische Lösung mit dem Augenmerk auf die beschränkte Garantie wird, nach Wahl von QI, sein: a) Vergütung des Kaufpreises oder b) Reparatur oder Ersatz der SOFTWARE, welche nicht durch diese beschränkte Garantie übernommen wird und welche an QI mit dem Ankaufbeweis zurückgesandt wird (z. B. Kopie der Zahlungsquittung). Diese beschränkte Garantie ist nicht gültig, wenn das Nicht-Funktionieren oder das Schlecht-Funktionieren der SOFTWARE zurückzuführen ist auf einen Unfall, falschen Gebrauch oder eine falsche Anwendung. Bei jeder ersetzten SOFTWARE ist eine Garantie inbegriffen für die Restzeit der ursprünglichen Garantieperiode oder von dreißig (30) Tagen, ausgehend von der längsten Periode.

IN DEN USA UND KANADA: KEINE ANDERE GARANTIE. Innerhalb der maximal erlaubten gesetzlichen Grenzen weist QI jede andere Garantie von sich, explizit oder implizit, worunter aber nicht beschränkt auf: die betreffende Garantie der Verkäuflichkeit und Eignung für spezifische Zwecke, mit Bezug auf die SOFTWARE und die zugehörigen Materialien. Diese beschränkte Garantie bietet Ihnen gewisse Rechte, und möglicherweise haben Sie auch andere Rechte, die je nach Staat, Provinz oder Land variieren können.

KEINE HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN. Innerhalb der maximal erlaubten Grenzen des anwendbaren Rechts wird QI oder ihre jeweiligen Lieferanten in keinem Fall Haftung übernehmen für welchen Schaden auch immer, inklusive und ohne Einschränkung: Schaden durch Verlust von Betriebseinkommen, Betriebsunterbrechungen, Verlust von Betriebsinformation oder anderer finanzieller Verlust resultierend aus der Verwendung oder dem Unvermögen im Gebrauch der SOFTWARE, einer Computerstörung oder -schaden oder jeglichen kommerziellen Schaden oder Verlust, selbst, wenn QI oder einer ihrer Lieferanten über die Möglichkeit eines solchen Schadens informiert wurden. In diesem Fall wird sich die volle Haftung von QI und ihren jeweiligen Lieferanten auf die Vergütung des durch Sie bezahlten Ankaufspreises für die SOFTWARE beschränken. Da manche Staaten, Provinzen und Länder gesetzlich die Haftung für Folgeschäden und zufälligen Schäden nicht erlauben, trifft oben stehende Beschränkung möglicherweise für Sie nicht zu.

AUSKUNFT. Für Fragen zu dieser Vereinbarung oder zur beschränkten Garantie, oder falls Sie aus einem anderen Grund Kontakt mit QI aufnehmen möchten, kontaktieren Sie bitte unsere lokale Agentur: HeartMath Deutschland GmbH, Tel.: +49-6805 679 85 30, E-Mail: info@heartmathdeutschland.de.

BESCHRÄNKTE GARANTIE AUF EMWAVE USB-SENSORMODUL UND SENSOR. Basisdeckung: Das Sensormodul und der Sensor haben eine Garantie für den ursprünglichen Besitzer während einer Periode von EINEM JAHR ab Datum des ursprünglichen Kaufs für Produktionsfehler von QI – und nicht vom Händler, bei welchem der Sensor gekauft wurde. Was QI tut: Weisen das Modul oder der Sensor innerhalb eines Jahres Fehler oder Störungen auf, wird das Teil repariert oder durch ein neues oder gründlich wiederhergestelltes Teil ersetzt, unter Vorbehalt, dass das defekte Teil mit einer Bezahlung von US \$5,00 für Versand- und Administrationskosten (dies sind keine Reparaturkosten) zurückgesandt wird. Zusätzlich verlangt diese Garantie, dass Sie einen Kaufbeleg und das Ankaufdatum beifügen.

Diese beschränkte Garantie deckt nicht das Folgende:

- 1) QI repariert keine Defekte unter der beschränkten Garantie im Bezug auf Unterhalt, der nicht durch QI durchgeführt wurde.
- 2) QI bietet keine Garantie, wenn Ihr Sensor sichtbar manipuliert, falsch gebraucht oder verändert wurde wie: Feuchtigkeitsschaden, welcher das korrekte Funktionieren des Sensors stört, Schaden am Gehäuse oder sichtbarer Schaden an Kabel oder Konnektor.
- 3) QI ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN UND FOLGESCHÄDEN.

Weil manche Staaten, Provinzen und Länder keinen Ausschluss der Haftung für zufällige, besondere oder Folgeschäden erlauben, ist die oben stehende Beschränkung möglicherweise für Sie nicht gültig.

Ihre Rechte unter impliziten Garantien und lokalem Recht: DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN EXPLIZITEN GARANTIEN, VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNG. QI BESCHRÄNKT DIE DAUER JEDER GARANTIE, BESTIMMT DURCH GESETZE EINES LANDES, STAATES ODER EINER PROVINZ, INKLUSIVE, ABER NICHT BESCHRÄNKT, AUF DIE GENANNTEN GARANTIE BETREFFEND VERKÄUFLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR BESTIMMTE ZWECKE, AUF EIN JAHR AB DATUM DES ANKAUFS.

Weil gewisse Staaten, Provinzen und Länder gesetzlich keine Beschränkung auf die Dauer einer Garantie erlauben, gilt die oben stehende Beschränkung möglicherweise nicht für Sie.

Diese beschränkte Garantie bietet Ihnen gewisse gesetzliche Rechte. Möglicherweise haben Sie auch noch andere Rechte, die je nach Staat, Provinz oder Land variieren.

emWave ist eine registrierte Handelsmarke der Quantum Intech, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © 2007 Quantum Intech, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieser Apparat ist konform mit FCC part 15 class B und CE EN 55.02 und 55.04.

Getestet für den Gebrauch mit FCC-Normen für Privat- und Betriebsanwendungen.

Produziert unter amerikanischem Patent mit Nummern: 6,358,201; 7,117,032 und 7,163,512. AU Patent Nr. 770323. EU Patent Nr. 1156851. China Patent Nr. 00807109.8. HK Patent Nr. 1042056. Korea Patent Nr. 10-0616370. Kanada Patent Nr. 2,364,032.


Conseils de sécurité

L'utilisation d'emWave Pro® et du logiciel ainsi que des exercices qui l'accompagnent doivent vous permettre de trouver un équilibre personnel, d'augmenter vos performances et votre niveau de conscience. Bien que cet outil et les exercices proposés sont sans danger et peuvent potentiellement avoir un effet bénéfique, ils ne se substituent en aucun cas à un traitement médical et ne peuvent aucunement induire ou garantir une guérison. Ce programme et les exercices associés ne peuvent servir à des fins médicales ni remplacer un traitement psychologique.

emWave Pro a été développé dans le but de s'exercer et de se divertir. Aucune information ou donnée provenant du mode d'emploi ou du logiciel ne peut être utilisée pour établir un diagnostic médical ou psychologique.

Le schéma de variabilité du rythme cardiaque peut être très différent d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de "bon" ou de "mauvais" schéma. La valeur de cohérence obtenue dans le programme d'entraînement ou lors des jeux aide surtout à reconnaître vos progrès au cours de la pratique de sorte à obtenir directement un état de cohérence physiologique. Ne comparez jamais vos résultats avec ceux d'une autre personne.

Les personnes souffrant de troubles du rythme cardiaque, comme la fibrillation ou flutter auriculaire ou une contraction prématurée auriculaire (PAC) ou des extrasystoles ventriculaires (PVC) de même que les enfants souffrant d'hyperactivité risquent de ne pas pouvoir utiliser l'emWave Pro avec succès.

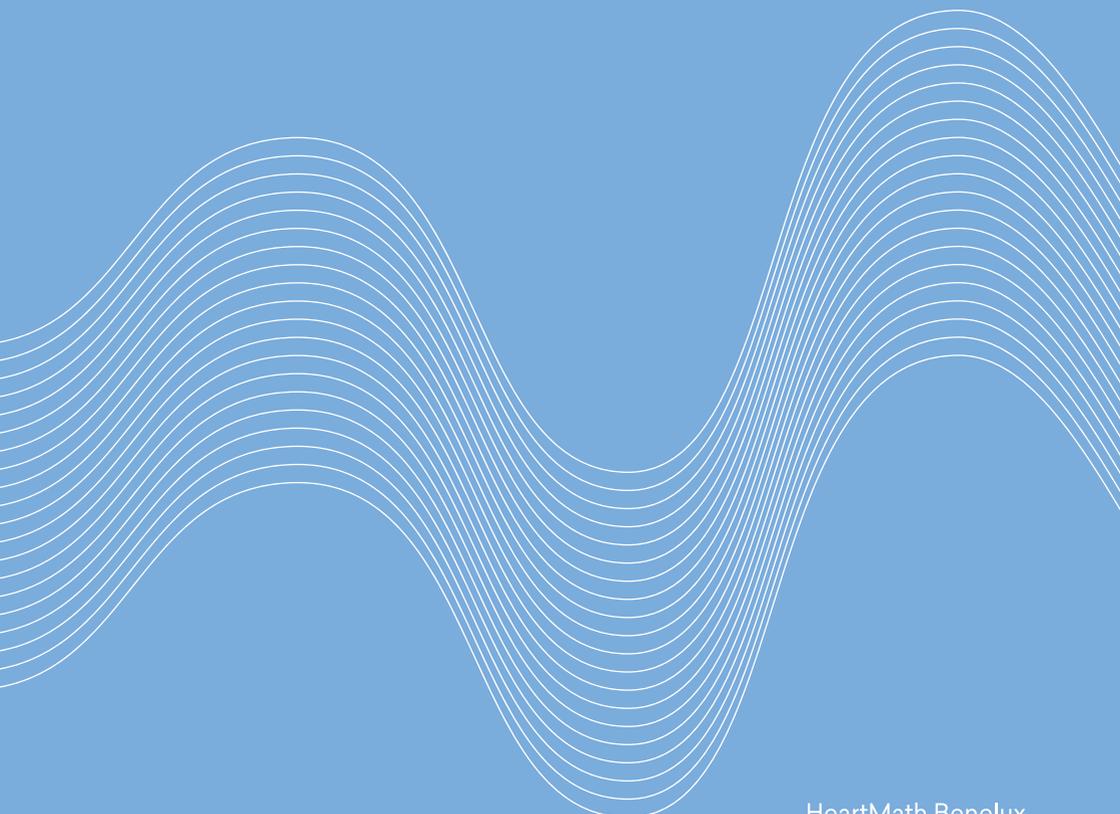

HeartMath Benelux
Postbus 30, 6230 AA Meerssen
Tel: 043-365 56 26; fax: 043-365 56 27
e-mail: info@heartmathbenelux.com
web: www.heartmathbenelux.com
© copyright Quantum Intech, Inc. 2010

